

Mega™ Memorest KANTAPÄÄ/YLEISPEHMUSTE



Mega™ Memorest on hygieniapäällisellä varustettu helmuksellinen tukityyny.

Oikein suoritettuna asentohoidolla edistetään hengitystä ja verenkiertoa, estetään nivelten virheasentojen syntymistä sekä iho/kudosvaurioiden syntyä. Kuntoutumisen perustana on onnistunut asento-hoito.¹

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

YLEISKUVAUS

Mega™ Memorest on hygieniapäällisellä varustettu helmuksellinen tukityyny.

Kehon lämmön ja painon yhteisvaikutuksesta hitaasti muotoutuva, viskoelastinen **EKO** PU-geelivaaho tasaa kudospaineita*

Pehmuste kiinnitetään patjan ympärille helmuksilla. Tuotteen saa tarvittaessa myös ilman helmuksia.

***KUDOSPAINEN TASAAMINEN =
antidecubitusominaisuus***

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on toimia apuna terveydenhoidon ammattihenkilön suunnittelemissa asentohoidossa.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.



Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tueksi sekä arvioinut lääkekinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Toimia asentohoidon tukena erilaisten kliinisten käyttöaiheiden tarpeen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten arvioimana ja ohjeistamana.

VASTA-AIHEET

Tukityynyjä ei saa käyttää suorassa kosketuksessa mihinkään potilaan kehoon, joissa voidaan havaita painehaava.

TUOTETURVALLISUUS


Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkekinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu yhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Vaahtomateriaali on CertiPUR-sertifioitu. Tuotteen paloluokitus on SL 1.²



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Mega™ Memorest KANTAPÄÄ/YLEISPEHMUSTE

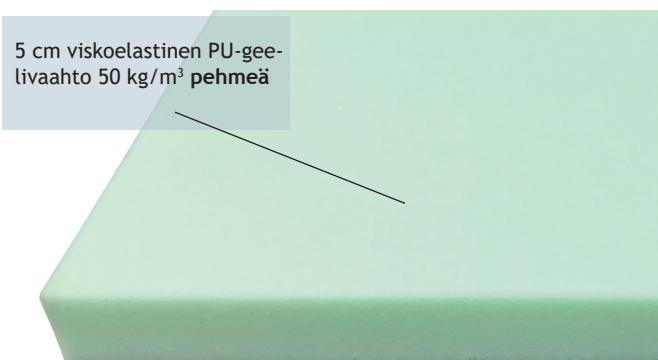

5 cm viskoelastinen PU-geelivahto 50 kg/m³ pehmeä

VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

Vahtosisus koostuu PU-geelivaahdosta, jonka korkea tiheyspaino (50 kg/m³) takaa pitkän käyttöiän.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-³, lika- ja eritetiivistä⁴ PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys⁵. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁶. Vakio-päällisessä on helmukset sekä vetoketju toisella lyhyellä sivulla.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

PÄÄLLISVARIANTIT

Medicase® (vakiopäällinen)

Medicase® (helmukseton)

Medicase® KS (kuumasaumattu, helmukseton)

KOKO JA PAINO

Vakiokoko: 35 / 50 x 75 x 5 cm

Paino: 830 / 1150 g

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYS-OHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuina on arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energiajakeena tai sekajätteisiin.

TAKUU

Kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai valmistuksesta.



HOITO- JA PESUOHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhinta pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuoksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH≈10). Muista riittävä huuhtelu-pyyhinta ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhinta pidentää tuotteen käyttöikä.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.

Huom! Vahtosisukselle ei vesipesua!



LÄHTEET

¹Kilpinen S., Laine M. & Lehmonen T. Asentohoitoa asento-hoitotyöryhmillä. 2016. Saatavilla: <http://urn.fi/URN:NBN-fi:amk-201604134249>.

²Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastavaan mukaisesti.

³Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

⁴Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

⁵Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁶Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.

VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

