

Mega™ T TUKITYYNY



Mega™T on hygieniapäällisellä varustettu T-mallinen tukityyny.

Oikein suoritettuna asentohoidolla edistetään hengitystä ja verenkiertoa, estetään nivelten virheasentojen syntymistä sekä iho/kudosvaurioiden syntyä. Kuntoutumisen perustana on onnistunut asentohoido.¹

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



YLEISKUVAUS

Mega™T on hygieniapäällisellä varustettu T-mallinen tukityyny.

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteiston käyttötarkoitus on toimia apuna terveydenhoidon ammattihenkilön suunnittelemassa asentohoidossa. Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääkkinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Toimia asentohoidon tukena erilaisten kliinisten käyttöaiheiden tarpeen mukaan terveydenhuollon ammattilaisten arvioimana ja ohjeistamana.

VASTA-AIHEET

Tukityynyjä ei saa käyttää suorassa kosketuksessa mihinkään potilaan kehosiin, joissa voidaan havaita painehaava.

TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaitteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääkinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL 1.²



VALMISTAJA / MYynti

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Mega™ T TUKITYYNY

SISÄTYYNYN OMINAISUUDET

Tukityynyssä on viskoosisekoitteinen sisäpäällinen, joka sisältää Durablend™ -tyynyttäytteen (sekoitus 80 % PU-vaah-
tomuovi, 20 % silikonoitu PES). Sisäpäällisessä on vetoketju
mahdollista tyynyttäytteen käsittelyä varten.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-³, lika- ja
eritettävistä⁴ PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on
korkea hankaus- ja kulutuskestävyys⁵. Päällisen materiaa-
liin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁶. Päälli-
sen pitkällä sivulla on tippasuojallinen vetoketju.

Mega®T on saatavilla myös kuumasaumatulla Medicase®
hygieniapäällisellä.

PÄÄLLISVARIANTIT

Medicase® (vakiopäällinen)

Medicase® KS (kuumasaumattu)



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



KOKO JA PAINO

Vakiokoko: 80 x 60 x 32 cm

Paino: 1100 g

TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYS- OHJEET

Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalis-
sa käyttötarkoituksensa mukaisessa käy-
tössä asianmukaisesti puhdistettuina on
arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää energiajakeena
tai sekajätteisiin.

TAKUU

Kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä
lukien. Takuu kattaa kaikki viat,
jotka johtuvat materiaalivirheistä tai
valmistuksesta.

HOITO- JA PESUOHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä pesevällä
ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuo-
kella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei
suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000
ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm.
Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla
max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä
huuhtelupyyhinta ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki
pois. Säännöllinen pintapyyhinta pidentää
tuotteen käyttöikää.

Sisätyyny täytteenen sekä hygieniapääl-
linen erikseen voidaan pestä pesuko-
neessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen
70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max.
95 °C:ssa.



LÄHTEET

¹Kilpinen S., Laine M. & Lehmonen T. Asentohoitoa asento-
hoitotyöryhmillä. 2016. Saatavilla: <http://urn.fi/URN:NBN:-fi:amk-201604134249>.

²Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastaa-
van mukaisesti.

³Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

⁴Testattu hyväksytyksi ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

⁵Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁶Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.

VALMISTAJA / MYynti

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi