

Exact™ Q

PAINEHAAVAISTUINTYYNY



Exact™ Q on hygieniapäällisellä varustettu reiällinen viskoelastinen istuintyynty.

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.

YLEISKUVAUS

Exact™ Q on hygieniapäällisellä varustettu reiällinen viskoelastinen istuintyynty. Ovaalin muotoisen reiän koko on 8x20 cm.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



Istuintyynty pyrkii kudospaineen tasaamiseen ensisijaisesti uppouman ja myötäilevyyden hallinnalla.*

Exact™ Q on valmistettu hitaasti muotoutuvasta, viskoelastisesta vaahtomuovista. EKO PU-geeli-vahto tasaa kudospaineita ehkäisten puutumista ja painehaavojen muodostumista.*

***KUDOSPAAINEEN TASAAMINEN =
antidecubitusominaisuus***

KÄYTTÖTARKOITUS JA -YMPÄRISTÖ

Tuotteen käyttötarkoitus on painehaavojen ennaltaehkäisy tai istuin-asennon korotus tasaisilla istuma-alustoilla matalan ja keskinkertaisen riskin potilailla, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt käytön tarpeelliseksi painehaavariskin tai muun käyttötarpeen vuoksi sekä arvioinut tuotteen sopivan kyseiseen hoitotilanteeseen.

Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

KÄYTTÄJÄPROFIILI JA KOHDEPOTILAAT

Käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on perehtynyt istumisen fysiologiaan, tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

Kohdepotilaita ovat potilaat edellä mainituissa ympäristöissä, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on määrittänyt tarpeen hoidon tuelle sekä arvioinut lääikinnällisen laitteen potilaalle ja kyseiseen hoitotilanteeseen soveltuvaksi.

INDIKAATIOT

Istuintyynty on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön istuma-asennossa, istumisvaiheiden kesto tulee määrittää erikseen terveydenhuollon

ammattihenkilön toimesta. Heikentynyt tunne ja/ tai kyvyttömyys suorittaa paineita vähentäviä liikkeitä voi rajoittaa suuresti jokaista istumisjaksoa.

Painehaavariskiluokat voidaan teknisen rakenteensa perusteella arvioida olevan seuraavat, kun otetaan huomioon kaikki muut tekijät:

Exact™ Q - matala ja keskinkertainen riski

Tyynyn suurin käyttäjän paino riippuu tyynyn soveltuvuudesta potilaalle. Käytön painoraja on 20-130/150 kg.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava istuinalustan mitat erikseen.

VASTA-AIHEET

Istuintyyntyä ei tule käyttää potilailla, joilla on korkea tai erittäin korkea painehaavan riski kliinisen arvioinnin perusteella. Kaikki potilaat, joille on kehittynyt painehaava istuintyyntyn kanssa kosketuksessa olevalle alueelle, kuuluvat joko korkean tai erittäin korkean riskin luokkiin riippumatta edellisen tai olemassa olevan painehaavan vakavuusluokituksista.

Istuintyynty eivät sovellu käytettäväksi leikkauksen jälkeisessä hoidossa kosketuksissa operoituun alueeseen.

TUOTETURVALLISUUS

Tuote on Lääkintälaiteasetuksen 2017/745 (MDR) mukainen luokan I lääikinnällinen laite (Sääntö 1 - Ei-invasiiviset laitteet). Päällis- ja sisusmateriaalit ovat Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Vaahtomateriaalit ovat CertiPUR-sertifioituja. Tuotteen paloluokitus on SL 1.¹




VALMISTAJA / MYYNTI


MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi

Exact™ Q

PAINEHAAVAISTUUNTYNNY

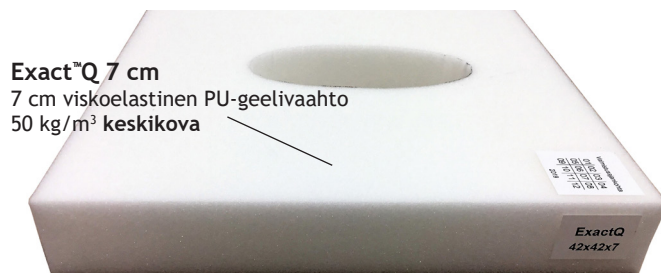

Exact™ Q 7 cm
7 cm viskoelastinen PU-geelivaaho
50 kg/m³ keskikova

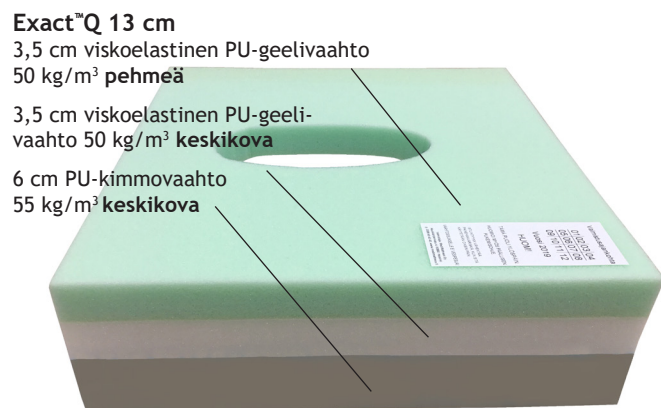

Exact™ Q 13 cm
3,5 cm viskoelastinen PU-geelivaaho
50 kg/m³ pehmeä
3,5 cm viskoelastinen PU-geelivaaho
50 kg/m³ keskikova
6 cm PU-kimmovaaho
55 kg/m³ keskikova

VAAHTOSISUKSEN OMINAISUUDET

7 cm korkea variantti on kokonaan viskoelastista PU-geelivaahtoa. 13 cm korkeassa variantissa on 7 cm viskoelastista PU-geelivaahtoa ja 6 cm PU-kimmovaahtoa. Vaahdon korkea tiheyspaine (50/55 kg/m³) takaa pitkän käyttöiän.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET

Hygieniapäällisen materiaali on joustavaa, neste-, lika- ja eritietäivistä³ PU-laminoitua polyesteria. Materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys⁴. Päällisen materiaaliin on integroitu bakteeri-, home- ja sienisuojaus⁵.

VAKIOKOOT JA PAINOT

42 x 42 x 7 cm, 680 g
42 x 42 x 13 cm, 970 g

PÄÄLLISVARIANTIT

Medicase® (vakiopäällinen)

TUOTTEEN KUNTO JA HÄVITYSOHJEET

Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut tuote ehjään. Istuintyyntyn arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:

- Sisukset: viisi (5) vuotta
- Päälliset: kaksi (2) vuotta

Tuote voidaan hävittää turvallisesti ja edullisesti energiajakeena tai sekajätteisiin.

TAKUU

Tuotteilla on kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat materiaalivehityksestä tai valmistuksesta.

HOITO-OHJE

Hygieniapäällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuksella. Syövyttävien aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla max. 60-80 % (pH=10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.

Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.

Huom! Vaahtosisukselle ei vesipesua!



LÄHTEET

¹Testattu EN ISO 12952 - 1: 2010 & EN ISO 12952 -2:2010 tai vastaavan mukaisesti.

²Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.

³Testattu hyväksytysti ASTM F1670 - 08/ASTM F1671 - 13 mukaisesti

⁴Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.

⁵Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



VALMISTAJA / MYYNTI

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4
00550 Helsinki
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi
www.medimattress.fi