




- Sätt på strömmen vid uttaget (om tillämpligt), och på sidan av styrenheten bredvid ingången för nätsladden.
- Kontrollera att madrassens lufttillförselslang är korrekt ansluten till styrenheten (den gröna indikatorn ska fylla fönstret på styrenhetens kontakt) och kontrollera att HLR-enheten är klickad in i stängt läge.
- Efter påslagning, visas STARTAR, sedan PÅBÖRJAS medan madrassen blåses upp (detta tar mellan 15–20 minuter).
- Väl upplåst går systemet automatiskt över i läget AKTIV. KONTINUERLIG LÅGTRYCKSTERAPI kan väljas via TERAPILÄGE-knappen (se TERAPILÄGE nedan). Komfortinställningen kan justeras med upp- och nedpilarna (MJUK/MEDIUM/FAST).
- Styrenheten låses automatiskt 2 minuter efter den sista knapptryckningen för att förhindra oavsiktligt knapptryck (utom TYST), vilket indikeras av  på skärmen. Tryck på och håll nere knappen TYST/LÅS UPP tills styrenheten piper om det krävs fler knappåtgärder (dvs. ändring av behandlingsläge eller komfortinställning).
- För att använda dynan med madrasssystemet (endast QUATTRO Plus): fäst dynans slang i anslutningsporten på sidan av madrassens huvudända, se till att anslutningen är korrekt inriktad och klicka fast den. Justera komfortinställningen till SITTANDE. Madrassen och kudden kommer att fungera samtidigt. När patienten ligger i sängen, justera komfortinställningen till MJUK, MEDIUM eller FAST. Dynan kan också användas oberoende av madrassen med hjälp av en adapter.
- För att avlägsna luft från madrassen vid demontering av systemet, använd CPR-funktionen enligt beskrivningen nedan.
- Tryckavlastande madrasser kan användas på profilerade sängramar, sängramar med ribbotten, sängramar med ilagd botten och divansängar.
- Ryggstöd eller kuddar för stöd bör placeras under madrassen för att möjliggöra oavbruten kroppskontakt med madrassytan. Se till att det finns så lite sängkläder som möjligt under patienten eftersom det kan minska madrassens tryckavlastande egenskaper - bäst är att lägga ett underlakan löst på madrassen.



TERAPILÄGE: Tryck på TERAPILÄGE-knappen för att alternera mellan terapilägena AKTIV (1 i 4 alternerande cykler) och KONTINUERLIGT LÅGTRYCK. Det valda terapiläget visas på skärmen. Standardläget är AKTIV terapi. När du växlar till KONTINUERLIGT LÅGTRYCK, visar systemet "VÄNTA" och tar ungefär 2 minuter för att starta.



KOMFORTINSTÄLLNING: Den automatiska standardinställningen för komfort är MEDIUM. Om patienten kräver en fastare eller mjukare madrass, kan komfortinställningen ökas eller minskas i enlighet med önskemål, med pilknapparna UPPÅT och NEDÅT (MJUK/MEDIUM/FAST). Komfortinställningen visas på skärmen. Kontrollera regelbundet för att säkerställa patientstöd och -komfort.



DATA: Används för att komma åt systeminformation, påverkar inte driften - se bruksanvisning för mer information.



TYST/LÅS UPP: Tryck för att tysta ljudet och ta bort meddelandet från skärmen. Denna knapp låser också upp styrenheten när  visas på skärmen - håll knappen intryckt tills styrenheten piper om ytterligare knapptryckning behövs (t.ex. för komfortinställning). Styrenheten låses igen 2 minuter efter den sista knapptryckningen.



MAX UPPLÅSNING: Blåser upp madrassen till maximalt statiskt tryck under en period på 15 minuter och återgår sedan automatiskt till läget AKTIV.

NFC-)) NFC (RFID): Styrenheten innehåller en passiv NFC-märkning, som innehåller kompletterande information. Placera en kompatibel NFC-aktiverad enhet, t.ex. en smartphone eller surfplatta, över NFC-symbolen för att visa denna information.

HLR FUNKTION: Vrid ratten till HLR-enheten moturs för att "klicka" in den i öppen position . HLR-enheten är placerad vid madrassens huvudända på höger sida, vilket indikeras av pilarna på den gula etiketten.

PATIENTTRANSPORT: Tryck på UPPLÅSNING för att helt fylla madrassen med luft. Koppla bort madrassens luftslang från styrenheten genom att vrida madrassens slanganslutning moturs tills de svarta linjerna matchar, och dra ut madrassens slanganslutning. Madrassen förblir upplåst och ger fortsatt stöd till patienten.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL: Håll alltid madrassöverdraget så rent som möjligt. För den dagliga rengöringen rekommenderas att överdragen rengörs med varmt vatten och tvål eller neutralt rengöringsmedel. Överdragen kan tas av och tvättas i maskin i max 73°C och torktumlas. Använd inte slipande rengöringsmedel, lösningsmedel eller alkoholbaserade rengöringsmedel, t.ex. Dettol, Phenicol, Hibiscrub, Clearsol, Stericol, Hycoline, eftersom dessa förstör överdragets material. Inspektera locket och insidan för tecken på skador.

MAX. BRUKARVIKT: QUATTRO Acute: 250 kg QUATTRO Plus: 200 kg



KONTRAINDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Aktiva supporttytor ska inte användas hos patienter med instabila frakturer, kraftigt ödem, brännskador eller känslighet för rörelse.

ALLMÄNNA VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH INFORMATION

- Se till att elförsörjningen är av den typ som anges på styrenheten.
- Kontrollera att nåtsladden är oskadad och placerad på ett sådant sätt att den inte utgör ett hinder eller kan orsaka personskada, t.ex. strypning.
- Se till att nåtsladden eller styrenheten inte kan fastna eller klämmas, t.ex. vid höjning eller sänkning av sängen eller sängskenorna eller något annat rörligt objekt.
- Styrenheten får endast användas med en lämplig godkänd sladd och stickproppssats som tillhandahålls av Direct Healthcare Group.
- Får inte användas vid förekomst av brandfarliga anestetika.
- Undvik att placera enheten på eller i närheten av en värmekälla.
- Får inte användas tillsammans med varmvattenflaskor eller elektriska filter.
- Materialen som används vid tillverkningen av alla komponenter i systemet överensstämmer med de obligatoriska brandsäkerhetsföreskrifterna.
- Direct Healthcare Group avråder rökning i samband med att systemet används, för att förebygga brandrisk hos lättantändliga tillhörande artiklar, såsom sänglinne.
- Får inte användas i en syrgasberikad miljö.
- Risk för brand om fel säkring används.

