

# Lagner til enhver lejlighed

SystemRoMedic™




- Glidelagner
- Træklagner
- Glide- og træklagner
- Inkontinensbeskyttelse
- Madrasbetræk osv.

**Direct Healthcare**  
**Group**


Advancing Movement & Health®

# Lagenguide


Vælg den rigtige glidezone på lagenet ud fra brugerfunktion.

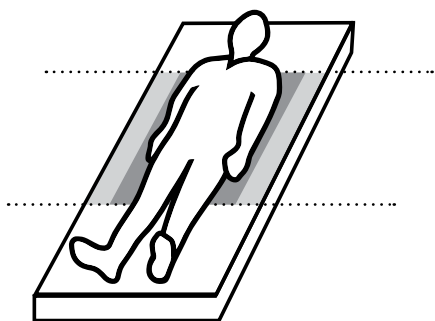

**Glidezone hofte:** Til mere aktive/lettere brugere som kun har behov for glidefunktionen i hofte-regionen.

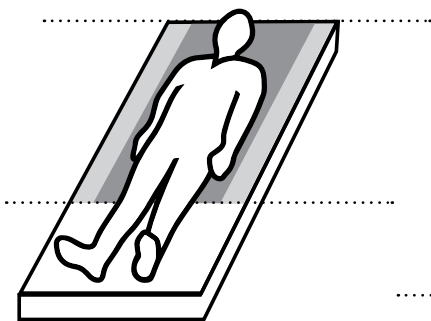


**Glidezone hoved-hofte:** Til mindre aktive/tungere brugere der har behov for glidefunktionen fra hofterne og opetter.

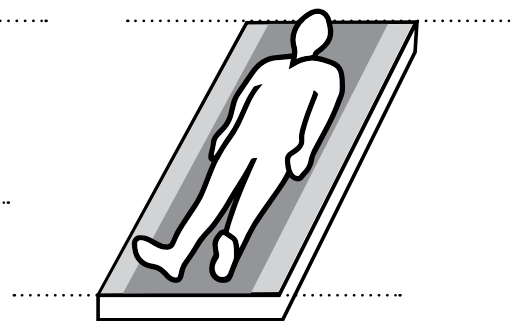

**Glidezone hoved-fødder:** Til brugere der er passive/har behov for mere intensiv pleje hvor der kræves glidefunktionalitet under hele kroppen.

Vælg det rigtige glidelagen ud fra sengens bredde.

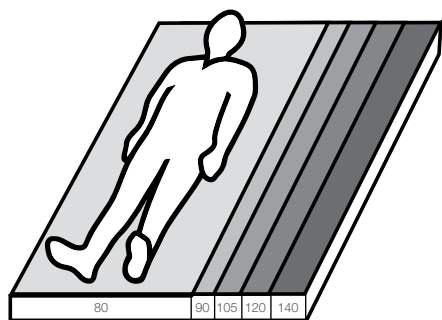

80 cm 31.5"	90 cm 35.4"	105 cm 41.3"	120 cm 47.2"	140 cm 55.1"
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sengens bredde

Madrassens dimensioner er vigtige for optimering af lagenets glidestykke og for at stimulere brugerens aktivitetsniveau.

Til vores træklagener og glide- og træklagener er der ingen anbefalet madrasbredde.

Find den rigtige funktion.



## Inkontinensbeskyttelse

Inkontinensbeskyttelse er et vaskbart inkontinenslagen der lægges oven på et almindeligt lagen og/eller andet sengetøj.

Inkontinensbeskyttelse fås med eller uden et glidestykke fornedet. Materialet er meget absorberende og fordeler væsken over et stort område.



## Håndtag

Nogle glide- og træklagener er også udstyret med håndtag der kan hænges på personløftere. Det betyder nemmere positionering, er en hjælp ved personlig hygiejne og letter fastgørelse af seler.



## Elastik


Glidelagener med dette symbol har en elastik der trækkes over madrassen. Andre lagener har sidestykker der stoppes in under madrassen.

Vedligeholdelsesansvisning.


Vælg det rigtige produkt under hensyntagen til anvisningen for vedligeholdelse.



## Vælg de rigtige kombinationer.

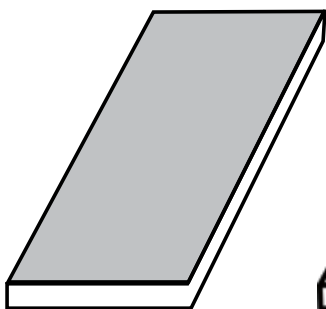


**Madrasetræk** med barrierelag. Anbringes oven på madrassen.

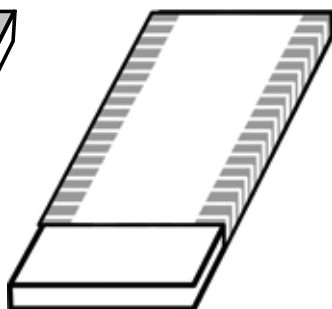

**Glidelagen.** Satin til midterstykket og nonslip-materiale til sidestykkerne. Glideretning i mønsterets retning.



**Glidelagen + trækklagen.** Gør vending nemmere og reducerer varmen fra glidelagenets satin. Glideretning i mønsterets retning.

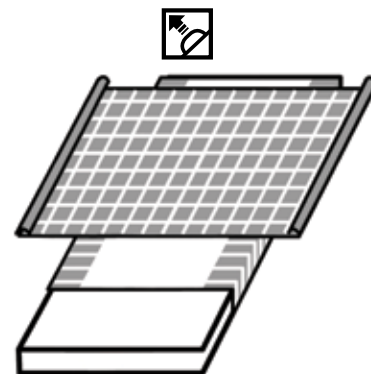

**Glidelagen + glide- og trækklagen.** Begge lagene har glidestykker både forenden og foroven. Glideretning i mønsterets retning.


## Sådan anvendes kombinationerne.



Til patienter der er i stand til selv at vende sig, er det tilstrækkeligt med et glidelagen der forbedrer gliddet i de zoner hvor der er behov for det.



En kombination af glidelagen og trækklagen som benyttes når brugeren er mindre aktiv, tungere/kræver mere intensiv pleje.

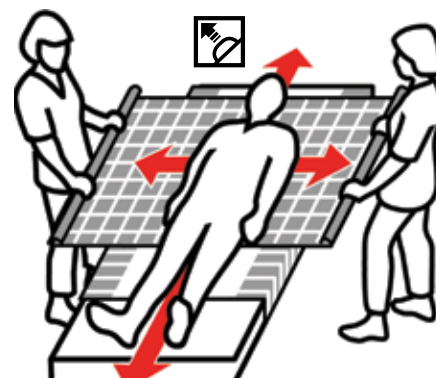

Kombinationen af et glidelagen og et glide- og trækklagen benyttes når brugeren er passiv, tungere/kræver mere intensiv pleje. Denne kombination benyttes ofte sammen med en personløfter, i forbindelse med personlig pleje, og når der skal fastgøres en sele.

## Find det rigtige lagen.

Eksempel fra artikellisten:

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madrasser (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	HMI-nummer	
1661	WendyLett	120	120	120	95	Stribet i grå/hvid	Glidelagen	Evt. information	HMI-nr. 88543	
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
Artikelnummer	Produktnavn	Lagenet passer til senge i bredden	Dimensioner (længde + bredde)		Zone/glide-stykke	Produktfarve	Produktfunktion	Øvrig information	Specielle egenskaber	Lagen + glidezone på madrassen

WendyLett-sortiment




WendyLett  
glidelagen  
sida 5




WendyLett 2Way  
trækklagen  
sida 6



WendyLett 4Way  
glide- og trækklagen  
sida 7

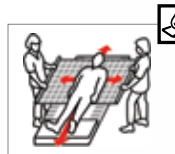

WendyLett Inco-serie  
WendyLett 4Way, Inco  
glide- og trækklagen  
sida 7

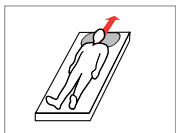

WendyLean  
pudebetræk  
sida 8



EasyRoll-sortiment



EasyRoll  
glidelagen  
sida 9-11



EasyRoll  
glidelagen, Inco  
sida 11



EasyRoll 2Way  
trækklagen  
sida 12



EasyRoll Inco 2Way  
glidelagen  
sida 12




EasyRoll 4Way  
glide- og trækklagen  
sida 13



EasyRoll 4Way  
glide- og trækklagen, Inco  
sida 13



EasyRoll pudebetræk  
sida 15

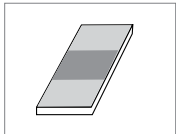

EasyRoll beskyttelseslagen  
og madrassbeskytter  
sida 16-18

Vores WendyLett-produkter er vores patenterede systemer i høj kvalitet designet til at lette repositionering højere op i sengen, til vending og mindre repositionering i sengen.

Direct Healthcare Groups tre WendyLett-lagener udgør tilsammen et gennemtænkt system af glide- og trækklagener som supplerer hinanden og bidrager til at gøre dagligdagen nemmere for såvel brugere, plejepersonale som pårørende.

## WendyLett glidelagen

WendyLett er et satinglidelagen. Gliddet sker sidelæns, i samme retning som striberne. WendyLett er beregnet til brugere der har svært ved at vende sig i sengen. WendyLett har et glat midterstykke, og det betyder at der kræves meget lidt energi til en vending. Det er meget nemt for brugeren at glide sidelæns, men de bliver standset af sidestykkernes nonslip-materiale så de ikke glider ud af sengen. Materialet forhindrer også brugeren i at

glide nedad i sengen. Når det ikke benyttes, kan WendyLett lægges på sengen som et normalt lagen med det glatte stykke i midten af sengen. Til brugere der har behov for lidt mere hjælp, kan WendyLett kombineres med et WendyLett 2Way trækklagen eller WendyLett4Way glide- og trækklagen.

WendyLett fås i mange forskellige udgaver og størrelser.



## Produktoversigt WendyLett glidelagen

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Lagen	Lagenlængde	Glidzone
1609	WendyLett	80-90	100	200	60	Hvid	Glidelagen		HMI-nr.		
1614	WendyLett	80-90	140	200	60	Hvid	Glidelagen		HMI-nr.		
1629	WendyLett	80-90	100	200	60	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr. 40397		
1634	WendyLett	80-90	140	200	60	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr. 40398		
1641	WendyLett	90	200	90	70	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr. 46097		
1639	WendyLett	105	200	200	70	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr. 40623		
1651	WendyLett	105	200	105	80	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr.		
1667	WendyLett	120	100	220	100	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr.		
1668	WendyLett	120	140	220	100	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr.		
1669	WendyLett	120	200	220	100	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr. 52439		
1661	WendyLett	120	200	120	95	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr. 88543		
1671	WendyLett	140	200	140	110	Stribet i grå/hvid	Glidelagen		HMI-nr. 88544		
1681	WendyLett	-	200	365	70	Stribet i grå/hvid	Glidelagen	Ekstra bredde der muliggør valgfri placering af glidestykket	HMI-nr. 88541		

**Materiale:** Polyester, bomuld, satin

**Vedligeholdelsesanvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel.

Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.



CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



## WendyLett 2Way trækragen

WendyLett 2Way er et trækragen lavet af materiale der er tilpasset til WendyLett glidelagener. Gliddet foregår sidelæns, i stribernes retning, og det betyder at brugeren ikke glider nedad i sengen.

WendyLett2 Way lægges oven på et WendyLett glidelagen. Kombinationen gør det nemt for plejepersonalet at vende brugeren sidelæns. WendyLett 2Way fås i mange forskellige udgaver og størrelser.



### Produktoversigt WendyLett 2Way trækragen

Art.nr.	Produkt navn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Glideretning
1620	WendyLett 2Way	-	90	180	-	Hvid	Trækragen	HMI-nr. -	
1631	WendyLett 2Way	-	100	200	-	Stribet i grå/hvid	Trækragen	HMI-nr. 40399	
1636	WendyLett 2Way	-	140	200	-	Stribet i grå/hvid	Trækragen	HMI-nr. 40400	

**Materiale:** Polyester, bomuld, satin

**Vedligeholdelsesanvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel. Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.



CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



#### Vores WendyLett-produkter

- Tyndt stof af høj kvalitet som er åndbart
- Eget til brugere med risiko for at udvikle tryksår
- Tydeligt mønster viser glideretning






## WendyLett4Way glide- og trækklagen

WendyLett4Way er et glide- og trækklagen der kan kombineres med WendyLett glidelagen der gør glidning både sidelæns og op/ned i sengen lettere, som gittermønsteret viser. WendyLett4Way lægges oven på et WendyLett glidelagen.

Kombinationen tillader positionering i fire retninger og herved lettes vending i

sengen og repositionering højere op i sengen samt mindre repositionering, mens man ligger i sengen, selv med store, tunge eller helt passive brugere. WendyLett4Way fås i mange udgaver og størrelser.

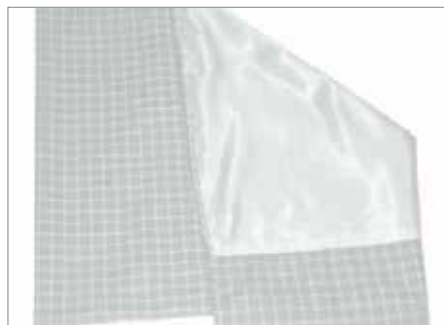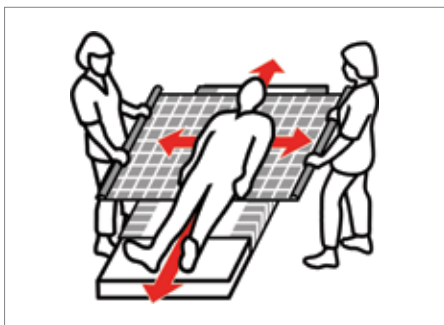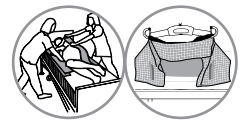

### Produktoversigt WendyLett4Way glide- og trækklagen

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)		Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Glideretning
		Længde (cm)	Bredde (cm)						
1657	WendyLett4Way	-	140	190	-	Ternet i grå/hvid	Glide- og trækklagen	2 x 7 håndtag	HMI-nr. 85300
1637	WendyLett4Way	-	140	200	-	Ternet i grå/hvid	Glide- og trækklagen		HMI-nr. 46098
1647	WendyLett4Way	-	200	200	-	Ternet i grå/hvid	Glide- og trækklagen		HMI-nr. 53230
1652	WendyLett4Way	-	140	260	-	Ternet i grå/hvid	Glide- og trækklagen	Bredere madras	HMI-nr. -

**Materiale:** Polyester, bomuld, satin

**Vedligeholdelsesansvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel.

Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.



CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



### Produktoversigt WendyLett4Way Inco glide- og trækklagen

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)		Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Glideretning
		Længde (cm)	Bredde (cm)						
1648	WendyLett4Way, inko	-	75	200	-	Ternet i grå/hvid	Glide- og trækklagen		HMI-nr. -
1649	WendyLett4Way, inko	-	140	120	-	Grå	Glide- og trækklagen	2 x 7 håndtag	HMI-nr. 105194

**Materiale:** Polyester, bomuld, satin

**Vedligeholdelsesansvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel.

Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.




CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



## WendyLean pudebetræk

De patenterede "udtrækshåndtag" er ikke de eneste egenskaber ved dette pudebetræk, men de er meget praktiske, når du skal hjælpe en bruger med at komme højere op i sengen eller til siddende stilling på kanten af sengen. Undersiden af pudebetrækket er i glat satin, hvilket gør det meget nemt både at placere puden og trække den ind under skuldrene på brugeren, så brugerens overkrop løftes op. Striberne markerer den retning der gør glidningen lettere.

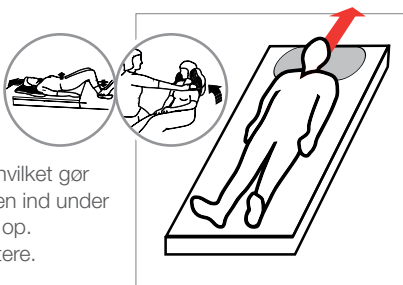


• Glat satin med "udtrækshåndtag"

## Produktoversigt WendyLean pudebetræk

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Glideretning
1680	WendyLean	-	50	60	-	Stribet i grå/hvid	Pudebetræk	2 håndtag	HMI-nr. 40401

**Materiale:** Overside: Polyester/bomuld. Bagside: Bomuld/polyester. Underside: Satin.

**Vedligeholdelsesanvisning:** Brug ikke skyllemiddel. Skal dryptørre eller tumles ved lav varme for at sikre maksimal levetid for materialet.

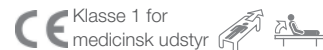



## EasyRoll glidelagen Hvid

Det prisbevidste alternativ til vores WendyLett-system. Forskellen er at EasyRoll er uforet og består af et glidestykke der er lamineret på et lagen. EasyRoll-systemet fås i adskillige varianter og størrelser med forskellige funktioner der er tilpasset så det sikres, at du kan finde den løsning der passer bedst til dine behov.

- **Markerings-  
sømme for  
lettere  
placering af  
lagenet**



### Produktoversigt EasyRoll glidelagen/hvidt

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Lagen	Lagenlængde	Glidezone
41801PS	EasyRoll glidelagen	80	100	180	60	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
41802PS	EasyRoll glidelagen	80	140	180	60	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
41803PS	EasyRoll glidelagen	80	200	180	60	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
41901PS	EasyRoll glidelagen	90	100	200	60	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. 121073		-	
41902PS	EasyRoll glidelagen	90	140	200	60	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. 117078		-	
41903PS	EasyRoll glidelagen	90	200	200	60	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. 117079		-	
411051PS	EasyRoll glidelagen	105	100	215	75	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
411052PS	EasyRoll glidelagen	105	140	215	75	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
411053PS	EasyRoll glidelagen	105	200	215	75	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
411201PS	EasyRoll glidelagen	120	100	230	90	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
411202PS	EasyRoll glidelagen	120	140	230	90	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	
411203PS	EasyRoll glidelagen	120	200	220	90	Hvid	Glidelagen	HMI-nr. -		-	

**Materiale:** Sidedykker: Bomuld/polyester. Glidestykker: Duchesse (polyester)  
**Vedligeholdelses-anvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel. Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.





CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



## EasyRoll glidelagen sribet i hvid/blå

Det prisbevidste alternativ til vores WendyLett-system. Forskellen er at EasyRoll er uforet og består af et glidestykke der er lamineret på et lagen. EasyRoll-systemet fås i adskillige varianter og størrelse med forskellige funktioner der er tilpasset så det sikres, at du kan finde den løsning der passer bedst til dine behov.

- **Markerings-sømme for lettere placering af lagenet**

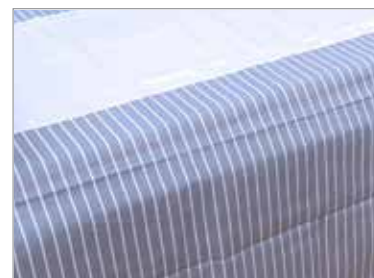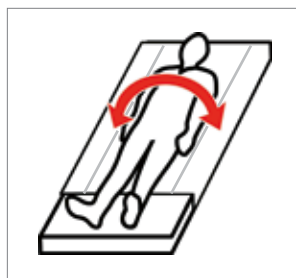

### Produktoversigt EasyRoll glidelagen/sribet i hvid/blå

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Lagen	Lagenlængde	Glidesezone
418011	EasyRoll glidelagen	80	100	180	50	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
418021	EasyRoll glidelagen	80	140	180	50	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
418031R	EasyRoll glidelagen	80	200	180	60	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
419011	EasyRoll glidelagen	90	100	190	60	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
419021	EasyRoll glidelagen	90	140	190	60	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
419031	EasyRoll glidelagen	90	200	190	60	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
419031R	EasyRoll glidelagen	90	200	90	70	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. 119061		
4110511	EasyRoll glidelagen	105	100	205	75	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
4110521	EasyRoll glidelagen	105	140	205	75	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
4110531	EasyRoll glidelagen	105	200	205	75	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
4110531R	EasyRoll glidelagen	105	200	105	85	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
4112011	EasyRoll glidelagen	120	100	220	90	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
4112021	EasyRoll glidelagen	120	140	220	90	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		
4112031	EasyRoll glidelagen	120	200	220	90	Sribet i hvid/blå	Glidelagen		HMI-nr. -		

**Materiale:** Sidestykker: Bomuld/polyester. Glidestykker: Duchesse (polyester)

**Vedligeholdelses-anvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel. Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.





CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



## EasyRoll glidelagen med Antislip-kant

EasyRoll glidelagen med Antislip-kant har "opbremsnings"-kanter på siderne af den glatte overflade, der er forstærket med med silikone for at forhindre at brugeren glider ud af sengen. Glidelagenet placeres på madrassen, og det elastiske stykke sikrer, at glidelagenet sidder fast om madrassen. Velegnet til personer med nedsat mobilitet og/eller stærke smerter, da det giver god støtte under vending, hvis brugeren ligger direkte på lagenet. Alternativt kan EasyRoll bruges i kombination med et træk-lagen eller et glide- og træk-lagen som en teknisk hjælp for plejepersonalet, når de vender/repositionerer plejepatient personer i sengen.

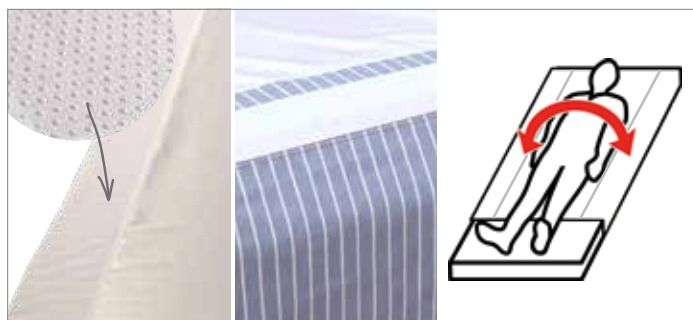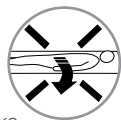

51902FAH

51901FAH, 51902FAH

### Produktoversigt EasyRoll glidelagen med Antislip-kant

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	HMI-nr.
51901FAH	EasyRoll glidelagen med Antislip-kant	90	100	180	50	Stribet i hvid/blå	Glidelagen	Bremsende silikoneoverflade	
51902FAH	EasyRoll glidelagen med Antislip-kant	90	140	180	50	Stribet i hvid/blå	Glidelagen	Bremsende silikoneoverflade	
519031RAH	EasyRoll glidelagen med Antislip-kant	90	200	90	70	Blå/hvid	Glidelagen	Bremsende silikoneoverflade	

**Materiale:** Sidestykker: Bomuld/polyester. Glidestykker: Duchesse (polyester)

**Vedligeholdelsesansvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel. Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.



CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



## EasyRoll glidelagen med barriere

EasyRoll glidelagen med barriere anbringes som et almindeligt lagen direkte på sengen, lagenkanterne anbringes under madrassen og fikseres her. "Slip sheet" med væskebarriere anvendes, når der er risiko for lækage. Barrierelaget er væskebestandigt og forhindrer, at der spredes væske til det underliggende sengetøj/madras. Røde markeringsstriber gør det lettere at kontrollere, at glidelagenet er placeret korrekt.



### Produktoversigt EasyRoll glidelagen med barriere

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	HMI-nr.
42901PS	EasyRoll glidelagen med barriere	90	100	200	60	Hvid/blå	Glidelagen med barriere		
42902PS	EasyRoll glidelagen med barriere	90	140	200	60	Hvid/blå	Glidelagen med barriere		

**Materiale:** Polyester. Barriere: PU. Absorberende lag: Polyester.

**Vedligeholdelsesansvisning:** Skal vaskes inden det benyttes første gang. Må ikke kemisk renses. Der må ikke bruges blegemidler. Der må ikke bruges skyllemiddel. Undlad tørretumbling for at sikre materialets optimale levetid.



CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



## EasyRoll 2Way Trækragen

EasyRoll 2Way trækragen benyttes i kombination med EasyRoll glidelagen. Trækragen lægges direkte oven på glidelagenet, og brugeren ligger på trækragen. Kombinationen af glidelagen og trækragen er en virkelig god hjælp når en sengeliggende plejepatient skal vendes. Ved at holde i trækragenet og trække i det kan brugeren meget nemt forflyttes til den ønskede position.



### Produktoversigt EasyRoll 2Way trækragen

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet
2101S	EasyRoll 2Way trækragen	-	140	200	-	Stribet i blå/hvid	Trækragen	Markeringsstriber viser trækretning

Glideretning →

HMI-nr. 119082

**Materiale:** Duchesse, bomuld/polyester

**Vedligeholdelsesanvisning:** Skal vaskes inden det benyttes første gang. Tørres ved maks. 70 °C.




CE Klasse 1 for medicinsk udstyr



## EasyRoll Inco 2Way Glidelagen

EasyRoll Inco 2Way glidelagen er et absorberende inkontinestæppe med et barrierelag der forhindrer lækage. Undersiden af produktet har også et lavfriktions belæg (glidende stof), som gør det let at glide i sengen. Det betyder, at det bliver lettere for plejepersonalet at vende patienten. EasyRoll Inco 2Way glidelagen består af tre håndtag på hver side, så man opnår et sikkert greb ved lateral forflytning af patienten.

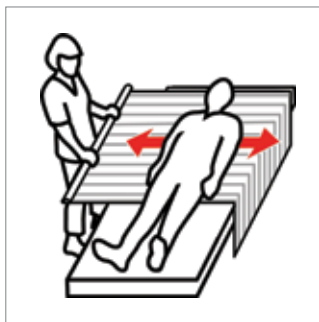

• Dette produkt anvendes uden et glidelagen nedenunder

### Produktoversigt EasyRoll Inco 2Way glidelagen

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet
10991	EasyRoll Inco 2Way	-	90	185	-	Hvid/rød	Glidelagen	2x3 håndtag

Glideretning →

HMI-nr.

**Materiale:** Duchesse. Barriere: PU. Absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedligeholdelsesanvisning:** Skal vaskes inden det benyttes første gang. Tørres ved maks. 70 °C.



CE Klasse 1 for medicinsk udstyr




## EasyRoll 4Way Glide- og trækklagen

Dette glide- og trækklagen lægges direkte oven på glidelagenet med glidestykkerne vendt mod hinanden.

EasyRoll glide- og trækklagen er et teknisk hjælpemiddel for plejepersonalet og gør det nemt at vende/repositionere en bruger der er sengeliggende. Når brugeren vendes, frigøres glidelagenet fra madrassen. Plejepersonalet tager fat i glide- og trækklagen ved brugerens hofte og skulder og sikrer, at de har fyldt hånden med stof. Derefter skal plejepersonalet – med vandrette håndled – læne sig bagover og lægge kropsvægten tilbage. Hvis der er to plejeassistenter til stede, kan den ene hjælpe med at presse ned på skulder og hofte på den anden side og samtidig skubbe. Dette vil vende brugeren.

Når brugeren er blevet vendt, placeres glide- og trækklagen under madrassen på begge sider.

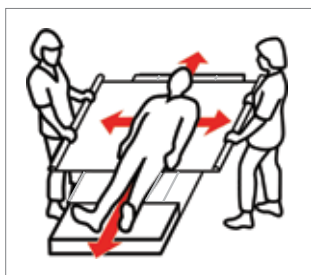

### Produktoversigt EasyRoll 4Way glide- og trækklagen

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Glideretning
4011S	EasyRoll 4Way glide- og trækklagen	-	140	210	-	Hvid/blå	Glide- og trækklagen		HMI-nr.
4011L	EasyRoll 4Way glide- og trækklagen	-	200	200	-	Hvid/blå	Glide- og trækklagen		HMI-nr.
4011S1	EasyRoll 4Way glide- og trækklagen	-	150	200	-	Stribet i hvid/blå	Glide- og trækklagen		HMI-nr.
4111T	EasyRoll 4way glide- og trækklagen	-	140	115	-	Hvid/blå	Glide- og trækklagen (med underliggende sengestykker)	2 x 9 håndtag	HMI-nr. 117080
4111LT	EasyRoll 4way glide- og trækklagen	-	200	115	-	Hvid/blå	Glide- og trækklagen (med underliggende sengestykker)	2 x 13 håndtag	HMI-nr. 117081

**Materiale:** Duchesse, bomuld/polyester

**Vedligeholdelsesanvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel. Skal vaskes inden det benyttes første gang. Tørres ved maks. 70 °C.



Klasse 1 for medicinsk udstyr



### Produktoversigt EasyRoll 4Way glide- og trækklagen, Inco

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Glideretning
10992-5	EasyRoll 4way glide- og trækklagen, Inco	-	140	200	-	Hvid/rød	Glide- og trækklagen	2 x 5 håndtag	HMI-nr. 119083

**Materiale:** Duchesse. Barriere: PU. Absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedligeholdelsesanvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel. Skal vaskes inden det benyttes første gang. Tørres ved maks. 70 °C.



Klasse 1 for medicinsk udstyr





## EasyRoll pudebetræk

EasyRoll pudebetræk (4303) med glideoverflade har lav sidelæns friktion, hvilket øger mobiliteten i hals og skuldre. Det giver også lavere friktion for nakken og ørerne. EasyRoll pudebetræk med barriere (4304) har et indvendigt barrierelag for at beskytte mod snavs og fugt, og det fungerer også som en barriere mod støvmider. Pudens stof forstærkes af pudebetrækket som lukkes med en lynlås. Dette pudebetræk har ingen glidefunktion.



### Produktoversigt EasyRoll pudebetræk

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Glideretning
4303	EasyRoll glidepudebetræk	-	50	60	-	Hvid	Pudebetræk	Glidestykke med lav friktion	HMI-nr. 119080
4304	EasyRoll pudebetræk med barriere	-	50	60	-	Hvid	Pudebetræk	Barrierelag	HMI-nr.

**Materiale:** 4303 Glidestykke: Duchesse (100 % polyester). Bagside: Bomuld/polyester. 4304 Barrierelag: Polyuretan. Areal: Bomuldsjersey.

**Vedligeholdelsesanvisning:** Der må ikke bruges skyllemiddel.

Skal vaskes inden det benyttes første gang. Tørres ved maks. 70 °C.




**CE** Klasse 1 for medicinsk udstyr

## EasyRoll Underpad med bændler

EasyRoll Underpad beskyttelseslagen benyttes som absorberende lag i sengen til brugere med inkontinens. Beskyttelseslagenet absorberer ca. 1-2 liter/m<sup>2</sup> og har et lamineret barriere-lag, der forhindrer væske i at sive igennem til det øvrige sengelinned.

Beskyttelseslagenet er stærkt og meget velegnet til at vende/repositionere patienter i sengen. Når man flytter/positionerer brugerne, skal man holde i den absorberende del, da sidestykkerne ikke er velegnede til at trække og repositionere med. Når man anvender produktet sammen med et glidelagen, opnås en glimrende kombination af hjælpeprodukter til inkontinens og repositionering.

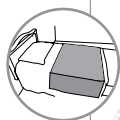

### Product overview EasyRoll Underpad med bændler

Art.nr.	Produkt navn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Barriere-lag	
80011B	EasyRoll Underpad	80-90	80	180	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen med bændler		HMI-nr. 119092	<input checked="" type="checkbox"/>
80011P	EasyRoll Underpad	80-90	80	180	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen med bændler		HMI-nr. 119093	<input checked="" type="checkbox"/>
80011-1	EasyRoll Underpad	80-90	85	180	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen med bændler		HMI-nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>
80011PL	EasyRoll Underpad	80-90	90	210	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen med bændler		HMI-nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>
80011PS	EasyRoll Underpad	90	70	190	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen med bændler		HMI-nr. -	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Materiale:

**80011B** Sengestykke: Bomuld/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester.

**80011P** Sengestykke: Polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011-1** Sengestykke: Bomuld/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester.

**80011PL** Sengestykke: Polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester

**80011PS** Sengestykke: Duchesse, bomuld/polyester; barriere: PU; absorberende lag: Polyester/rayon

**Vedligeholdelses-anvisning:** Kan tørretumbles ved 70 °C. Må ikke kemisk renses. Det må ikke benyttes blegemidler.

Der må ikke bruges skyllemiddel.





## EasyRoll Underpad med bændler /ekstra beskyttelse

EasyRoll Underpad beskyttelseslagen benyttes som absorberende lag i sengen til brugere med inkontinens. Denne model er ekstra absorberende. Beskyttelseslagenet er stærkt og meget velegnet, når senge-liggende patienter skal vendes/repositioneres.

Når det anvendes sammen med et glidelagen, opnås en fremragende produktkombination af hjælpemidler til inkontinens og repositionering.




### Produktoversigt EasyRoll Underpad med bændler/ekstra beskyttelse

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Barrirelag
80019	EasyRoll Underpad	90	120	180	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen med bændler		HMI-nr. 119094

**Materiale:** Bomuld/polyester sengestykke. Polyester/rayon absorberende lag. Polyuretan væskebarriere.

**Vedligeholdelsesanvisning:** Kan tørretumbles ved 70 °C. Må ikke kemisk renses. Det må ikke benyttes blegemidler. Der må ikke bruges skyllemiddel.

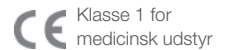

## EasyRoll Underpad uden bændler

Beskyttelseslagener benyttes som absorberende beskyttelse i sengen til beboere med inkontinens. Beskyttelseslagenet absorberer ca. 1-2 liter/m<sup>2</sup> og har et lamineret barrirelag der forhindrer væske i at sive igennem til det øvrige sengelinned. Beskyttelseslagenet er stærkt og meget velegnet, når senge-liggende patienter skal vendes/repositioneres i sengen. Når man flytter/positionerer brugerne, skal man holde i den absorberende del, da side-stykkerne ikke er velegnede til at trække og repositionere med. Når beskyttelseslagenet bruges sammen med et glidelagen, opnås en fremragende produktkombination af hjælpemidler til inkontinens og repositionering. Takket være beskyttelseslagenets høje absorptionsevne oplever brugeren det som tørre, da der sjældent er behov for produktets maksimale kapacitet.



### Produktoversigt EasyRoll Underpad uden bændler

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet	Barrirelag
80017-1	EasyRoll Underpad	80-90	85	90	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen uden bændler		HMI-nr. 119096
80017P	EasyRoll Underpad	80-90	85	90	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen uden bændler		HMI-nr.
80018P	EasyRoll Underpad	80-90	150	90	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen uden bændler		HMI-nr.
80018	EasyRoll Underpad	80-90	150	90	-	Hvid/lysegrøn	Beskyttelseslagen uden bændler		HMI-nr.

**Materiale 80017-1; 80017P; 80018P:** Polyester; Barrier PU; Absorbent Polyester  
**Materiale 80018:** CottonPolyester; Barrier PU; Absorbent PolyesterRayon


**Vedligeholdelsesanvisning:** Kan tørretumbles ved 70 °C. Må ikke kemisk renses. Det må ikke benyttes blegemidler. Der må ikke bruges skyllemiddel.



## EasyRoll Underpad med glidelagen

EasyRoll Underpad med glidelagen benyttes på samme måde som EasyRoll Underpad, men har ergonomiske sidestykker og benyttes som beskyttelse i sengen til brugere med inkontinens og som et hjælpemiddel ved repositionering. Beskyttelseslaget absorberer ca. 1-2 liter/m<sup>2</sup> og har et lamineret barriereleg, der forhindrer at væske siver igennem til det øvrige sengelinned.

Beskyttelseslaget er stærkt og meget velegnet, når sengeliggende patienter skal vendes/repositioneres. Glidestykket i bunden giver en glimrende produktkombination som hjælpemiddel ved inkontinens og repositionering.

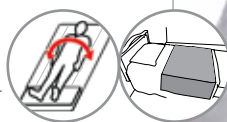


• Dette produkt anvendes uden et glidelagen nederunder

### Produktoversigt EasyRoll Underpad med glidelagen

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet
80010P	EasyRoll Underpad med glidelagen	80-90	80	180	-	Hvid	Beskyttelseslagen med båndler, glid på undersiden	Barriereleg <input checked="" type="checkbox"/> HMI-nr. 119084

**Materiale:** Polyester sengestykke. Polyester/rayon absorberende lag. Polyuretan væskebarriere. Duchesse glidestykke.

**Vedligeholdelsesanvisning:** Kan tørretumbles ved 70 °C. Må ikke kemisk renses. Det må ikke benyttes blegemidler. Der må ikke bruges skyllemiddel.

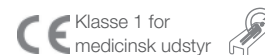

## EasyRoll Madrasbeskytter

Madrasbeskyttere beskytter din madras mod fugt i tilfælde af fx inkontinens eller mod støvmider eller blot som generel beskyttelse af madrassen/topmadrassen. Madrasbeskytteren har et barriereleg på undersiden der beskytter mod at fugt siver igennem, og det fungerer samtidig som en barriere mod støvmider.



### Produktoversigt EasyRoll Madrasbeskytter

Art.nr.	Produktnavn	Passer til madras (cm)	Længde (cm)	Bredde (cm)	Glidestykke (cm)	Farve	Funktionalitet	Andet
90.200J01	EasyRoll Madrasbeskytter	90	200	90	-	Hvid	Madrasbetræk	HMI-nr. 119081
105.200J01	EasyRoll Madrasbeskytter	105	200	105	-	Hvid	Madrasbetræk	HMI-nr. -
120.200J01	EasyRoll Madrasbeskytter	120	200	120	-	Hvid	Madrasbetræk	HMI-nr. -

**Materiale:** Bomuldsjersey sengestykke. Polyuretan væskebarriere.  
**Vedligeholdelsesanvisning:** Kan tørretumbles ved 70 °C. Må ikke kemisk renses. Det må ikke benyttes blegemidler. Der må ikke bruges skyllemiddel.





---

## SystemRoMedic™

### Mere end 30 år i enkelhedens tjeneste

Direct Healthcare Groups enestående, lette forflytningskoncept er markedets bredeste og mest komplette sortiment af smarte, brugervenlige og sikre hjælpemidler til alle typer patientforflytninger og behov for manuelle løft.

Filosofien bag konceptet er at fokusere på forebyggelse og reduktion af arbejdsskader på en måde der samtidig giver brugerne en oplevelse af større grad af uafhængighed, deltagelse og værdighed.

Med en unik kombination af træning og et komplet sortiment af effektive forflytningshjælpemidler tilbyder vi en forbedring af både arbejdsmiljøet og kvaliteten af plejen og samtidig betydelige økonomiske besparelser.

I mere end 30 år har vi udviklet SystemRoMedic til at tilbyde enkle løsninger til strålende resultater og en enklere hverdag for både brugere og sundhedspersonale.

### **Direct Healthcare Group tilbyder løsninger og støtte til at styrke uafhængighed og deltagelse for medborgere med funktionsnedsættelse samt ældre, og til at gøre arbejdet lettere for plejepersonalet.**

*The Direct Healthcare Group er en af de førende virksomheder inden for leverandører til sundhedssektoren i Europa med egne produktionsorganisationer og salgsselskaber i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Nederlandene, Storbritannien, Frankrig, Kina, Canada og USA. Direct Healthcare Groups produkter forhandles desuden af partnere i mere end 40 lande over hele verden.*

*Vores brede sortiment af produkter af høj kvalitet omfatter et komplet system til lette forflytninger samt andre hjælpemidler til betjening af patienter samt bade- og toiletprodukter.*

---

## Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Bredgade 45, DK-7400 Herning  
T +45 70 22 43 41  
www.directhealthcaregroup.com  
info.dk@directhealthcaregroup.com